

① コンパウト[®]の中で組織周囲の生食等を取り去る




② ステンレス容器へ薄切面を下方に組織片を沈める



☆組織が浮き上がらないように注意して下さい

③ ドライアイスの板にアセトンをかける

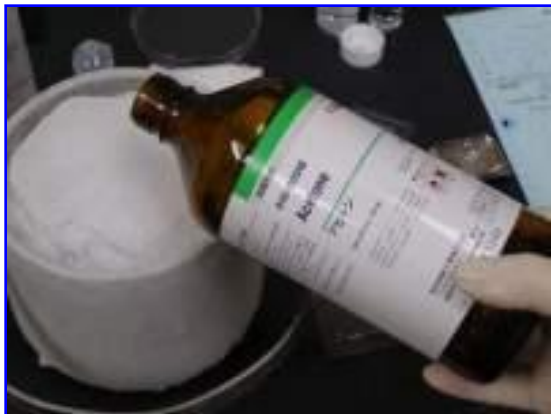

④ ドライアイスに載せ急速凍結させる



☆ステンレス容器の上下を持って、強くドライアイスに押しつける（この時、指をやけどしないように注意）。

⑤ 蓋をして完全に凍結（白色固形化）させる



⑤ 凍結検体の包装および郵送

☆以下の操作は検体が溶けないよう速やかに行ってください。



机の上等で軽く叩き、ブロックをはずす



パラフィルム、アルミホイルに包む



施設名、患者名、採取日を記載し検体を入れる



送付容器にドライアイスを詰め検体を入れる(2~4kg程度)



蓋をしガムテープを周囲に貼る

☆クール（冷凍）便で発送する